

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЖГУТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ПО ТУ
32.50.50-001-26528997-2019

1. Назначение изделия

Жгут предназначен для временной остановки кровотечения при повреждении артериальных сосудов нижних и верхних конечностей. Жгут кровоостанавливающий - одноразовое изделие, выпускается в нестерильном виде.

Область применения: оказание первой помощи.

2. Комплектность.

В комплект поставки жгута входят изделие, упаковка и эксплуатационный документ, в соответствии с таблицей .

Таблица

Наименование	Кол-во
Жгут кровоостанавливающий одноразовый по ТУ 32.50.50-001-26528997-2019 одного артикула	1шт
Инструкция по применению	1шт
Упаковка потребительская - пакет из полиэтиленовой пленки	1шт

3. Устройство жгута

Жгут состоит из:

1. основной тканой ленты,
2. полимерной пряжки,
3. закрутки,
4. фиксирующей тканой ленты.

4. Принцип действия

Жгут фиксируется на конечности с помощью пряжки, далее с помощью перемещения закрутки производится закручивание ленты жгута до полной остановки кровотечения. После достижения необходимого для остановки кровотечения усилия закрутка закрепляется фиксирующей лентой.

5. Побочные действия


Неправильное использование жгута может привести к следующим осложнениям:

- 1) Чрезмерное затягивание жгута может вызвать сдавливание мышц, нервов, сосудов и стать причиной паралича конечности.
- 2) Слабо наложенный жгут не останавливает артериальное кровотечение и создает условия для венозного застоя и усиления кровотечения.
- 3) Наложение жгута на среднюю треть плеча может привести к травмированию лучевого нерва.

6. Подготовка жгута к использованию:

- Извлечь жгут из упаковки, расправить;
- Визуально проверить целостность жгута.
- Внимательно прочитать руководство по эксплуатации;

7. Использование изделия

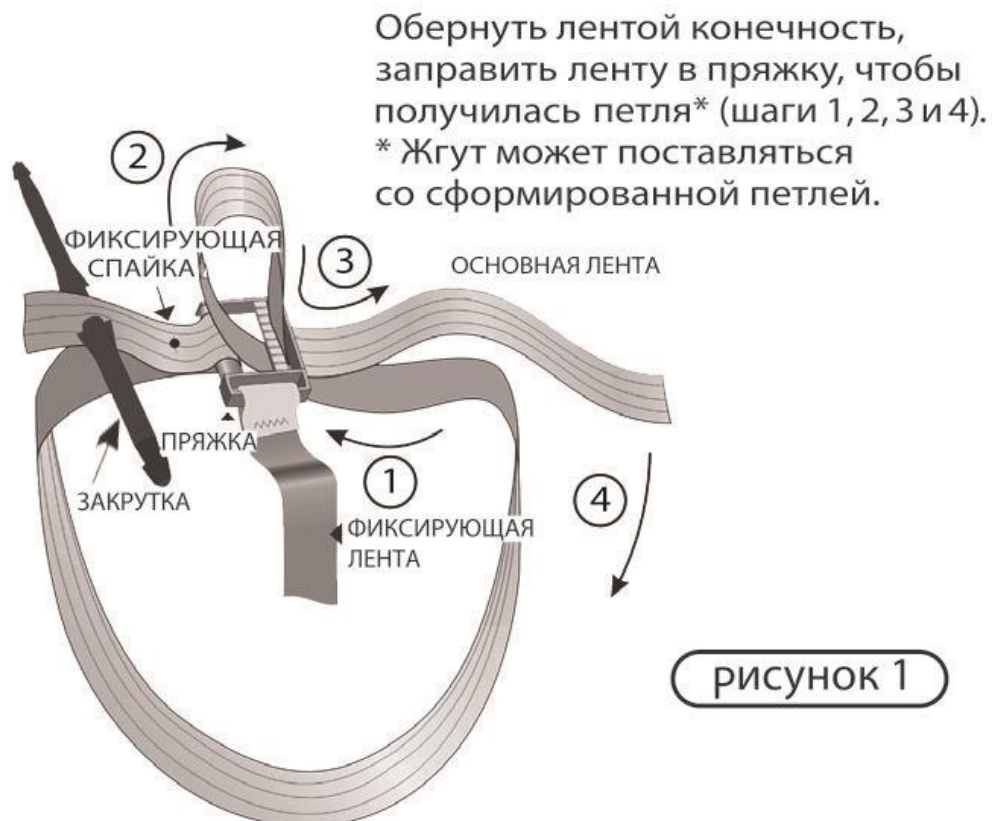



Обернуть основную ленту вокруг конечности вторым слоем (шаги 5 и 6) и, проколов ее закруткой, нанизать до середины закрутки (шаг 7).

рисунок 2



Оттягивая закрутку (шаг 8), закрутить основную ленту до отрыва фиксирующей спайки и далее закручивать до остановки кровотечения (шаг 9).

рисунок 3

Проколоть фиксирующую ленту
закруткой для предотвращения
раскручивания (шаг 10).

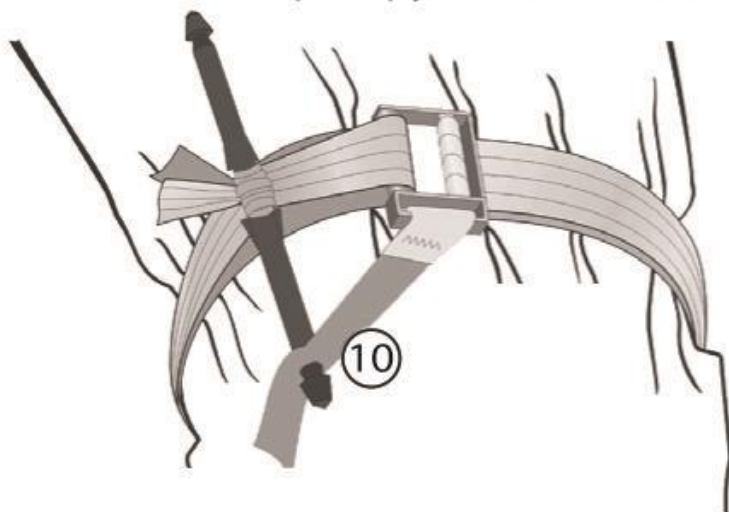


рисунок 4

8. Техническое обслуживание

В техническом обслуживании не нуждается.